

## **NL Eenvoudig bleken van uw tanden in 2 stappen.**

De whiteningpen is ontwikkeld voor het bleken van tanden in slechts 2 stappen. De eerste resultaten ziet u al na enkele dagen.

### **Whiteningpen bevat**

Stap A: Accelerator (5 ml)

Stap B: Whiteninggel (5 ml)

Tooth shade guide

### **Gebruiksaanwijzing**

Het is erg belangrijk om alvorens de behandeling te starten uw tanden goed te poetsen zodat het vrij is van etensresten en overblijfselen. Hierna kunt u doorgaan met Stap 1.

#### **Stap 1: Accelerator vloeistof**

Schroef dopje van de whiteningpen met Stap 1 open en breng een laag accelerator aan op de tanden waarbij u elke tand afzonderlijk behandelt. Houd uw mond open zodat uw tong en lippen het middel er niet kunnen afhaken. Sluit dopje van de accelerator stevig op de fles voor een volgend gebruik en ga nu door met Stap 2.

#### **Stap 2: whiteninggel**

Schroef dopje van de whiteningpen met Stap 2 open en breng een laag whiteninggel op elke afzonderlijke tand aan. Raak met uw tong en uw lippen gedurende 30 seconden uw behandelende tanden niet aan. Sluit dopje van de whiteninggel stevig op de pen voor een volgend gebruik.

### **Optimaal resultaat**

Het beste resultaat wordt verkregen door elke keer na de behandeling gedurende 30 minuten niet te eten en te drinken. De pen bevat voldoende voor een gebruik gedurende 14 dagen. Optimaal resultaat wordt verkregen door het product 2 maal per dag te gebruiken gedurende 1 week bijvoorbeeld s'ochtens en s'avonds. Afhankelijk van het gewenste resultaat die u kunt beoordelen aan de hand van de tooth shade guide, kunt u de behandeling desgewenst voortzetten tot 14 dagen.

### **Waarschuwing**

- Product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar, personen met tandvleesziektes of ontstekingen aan de tanden, bloedend tandvlees, ernstige blootliggende tanden, personen met overgevoelige tanden en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- Vermijd contact met tandvlees en gebruik het product niet als u gaatjes heeft.
- Indien u last heeft van allergie voor één van de ingrediënten gebruik met product dan niet, bij erge overgevoeligheid van uw tanden kunt u besluiten het product één maal per dag te gebruiken. Stop bij het gebruik van erge irritatie.
- Vullingen, sealants, kronen en brugwerken kleuren niet mee en worden niet beschadigd door het bleken.
- Het product dient bij kamertemperatuur bij voorkeur koel te worden bewaard