



NL

Inhoud

- 1 x Dr. Vac-toestel
- 8 x siliconenopzetstuk (2 x geel, 2 x groen, 2 x rood, 2 x blauw)
- 1 x reinigingsborstel
- 1 x gebruiksaanwijzing

Bedieningselementen

- 1 – siliconenopzetstuk
- 2 – sproeier
- 3 – veiligheidsopzetstuk
- 4 – opvangreservoir
- 5 – filter
- 6 – ON/OFF/LICHT-schakelaar
- 7 – batterijvak
- 8 – lamp

ON	OFF	LICHT
ON	OFF	LICHT
MARCHE	ARRÊT	LUMIERE
ON	OFF	LUCE
ON	OFF	LICHT
ON	OFF	VILÁGÍTÁS
ZAP	VYP	SVĚTLO
ON	OFF	LUMINĂ

NL GEBRUIKSHANDLEIDING

Bediening

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en voer het af overeenkomstig de geldende, wettelijke bepalingen.
2. Open het batterijvak door het deksel te verschuiven en open te klappen.
3. Let op de polariteit (+ / -) en leg twee nieuwe 1,5 V-batterijen type AA in het vak of haal, indien van toepassing, eerst de gebruikte batterijen eruit.
4. Sluit het batterijvak door het deksel dicht te klappen en weer terug op zijn plaats te schuiven.

OPGELET: 2x 1,5V batterijen van het type AA vereist – niet in levering inbegrepen. Indien u merkt dat het toestel minder vermogen begint te leveren, dient u steeds beide batterijen tegelijkertijd te vervangen.

5. Schuif de ON/OFF/LICHT-schakelaar op “LICHT”. Met het lampje kunt u in het oor schijnen om te zien waar het oorsmeer zich bevindt alvorens de oorreiniger aan te zetten.
6. Plaats het siliconenopzetstuk op de sproeier van de oorreiniger.
7. Schuif de ON/OFF/LICHT-schakelaar op “ON” en breng de sproeier voorzichtig in het te reinigen oor.
8. Beweeg het toestel met licht cirkelvormige bewegingen voor- en achterwaarts om tot bij het oorsmeer te komen.
9. Wanneer u klaar bent, haalt u de sproeier weer uit het oor en zet de ON/OFF/LICHT-schakelaar op “OFF”.
10. Maak het opzetstuk en het opvangreservoir grondig schoon. Hetzelfde dient ook te gebeuren wanneer tijdens het reinigen het gebruikte opzetstuk verstopt blijkt te zijn.

TIP: Het is aan te bevelen het toestel te gebruiken na een bad of een douche. Dan laat het oorsmeer zich makkelijker verwijderen. Om hygiënische redenen mag er één opzetstuk niet door meerdere personen worden gebruikt en moet het regelmatig worden vervangen!

Reinigen en bewaren

OPGELET: Om het toestel en de hulpstukken te reinigen, mag u geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen gebruiken!

1. Schakel het toestel uit – ON/OFF/LICHT-schakelaar in stand “OFF”.
2. Haal het siliconenopzetstuk van de sproeier en reinig de gebruikte opzetstukken met warm water en eventueel wat zeep.
3. Haal het opvangreservoir van het toestel en reinig het met warm water en eventueel wat zeep.
4. Verwijder de filter en maak hem schoon met de reinigingsborstel. Indien nodig kan de filter ook met warm water en wat zeep gereinigd worden.
5. De behuizing kunt u met een vochtige doek schoonmaken en daarna met een ander doek droogwrijven.
6. Het toestel en de hulpstukken moeten volledig droog zijn alvorens u alles weer in elkaar mag monteren.
7. Bewaar het toestel op een propere, droge plaats buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheid

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens u het toestel gaat gebruiken. Leef alle veiligheidsvoorschriften na. Zo voorkomt u schade door foutief gebruik. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u deze later nog kunt raadplegen indien nodig. Indien u het toestel aan een derde persoon zou doorgeven, moet u deze gebruiksaanwijzing eveneens aan hem/haar bezorgen. Dr. Vac is geen medisch apparaat en niet geschikt voor medisch

gebruik. Doel - Beoogd gebruik: wellness product.

OPGELET:

- Het toestel is uitsluitend bestemd voor privégebruik.
- Het toestel dient voor het reinigen van de oren. Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden.
- Verstikkingsgevaar bij inslikken. Houd het verpakkingsmateriaal en het toestel, de siliconenopzetstukken en de batterijen buiten bereik van kinderen en dieren.
- Laat het toestel nooit onbewaakt achter wanneer het in gebruik is. Wees uiterst voorzichtig wanneer u het toestel gebruikt in de nabijheid van kinderen of personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen.
- Het toestel mag niet gebruikt worden door personen - kinderen inbegrepen - met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of personen die onvoldoende ervaring met en kennis van het toestel hebben. Dit geldt niet wanneer deze laatste categorie is geïnstrueerd in het gebruik van het toestel of wanneer zij het toestel gebruiken onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid. Er dient steeds op gelet te worden dat kinderen niet met het toestel spelen.
- Indien er sprake is van een aandoening aan de oren, de gehoorgang of het trommelvlies, dient u eerst een arts te raadplegen alvorens met het toestel aan de slag te gaan.
- Het toestel mag alleen worden gebruikt wanneer het siliconenopzetstuk is gemonteerd.
- De sproeier mag niet te diep in het oor worden gestoken om verwondingen aan de gehoorgang en het trommelvlies te voorkomen.
- Schakel het toestel onmiddellijk uit wanneer u tijdens het gebruik pijn krijgt en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Gebruik het toestel niet wanneer het is beschadigd. Open het toestel nooit om een mogelijk defect op te sporen. Voor beschadigingen aan het toestel door foutief gebruik kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Neem contact op met onze klantendienst.
- Gebruik het toestel alleen in combinatie met de meegeleverde onderdelen.
- Hanteer het toestel nooit met vochtige of natte handen en vergewis u ervan dat het toestel niet in water of andere vloeistoffen kan vallen.
- Dek de verluchtingsgaten tijdens het gebruik niet af omdat anders het toestel oververhit zou kunnen raken.
- Schakel het toestel uit alvorens u het gaat reinigen.
- Wanneer u het toestel reinigt, dient u erop te letten dat er geen vloeistof in het toestel kan binnendringen.
- Laat het toestel nooit vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- Stel het toestel niet bloot aan extreme temperaturen, temperatuurschommelingen, direct zonlicht of vochtigheid.
- Controleer de contacten in het toestel en aan de batterijen op verontreinigingen alvorens u de batterijen in het toestel stopt en reinig de contacten indien nodig.
- Gebruik alleen het batterijtype dat is aangegeven in de technische gegevens.
- Zijn de batterijen leeg of gebruikt u het toestel langere tijd niet, haal dan de batterijen uit het toestel. Zo voorkomt u dat de batterijen gaan lekken en het toestel beschadigen.
- Is een batterij toch gaan lekken in het toestel, dient u ervoor te zorgen dat uw huid, ogen en slijmvlies niet in contact komen met het batterijzuur. Gebeurt dit toch, spoel dan overvloedig met helder water en ga onmiddellijk naar een arts.
- Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Is dit toch voorgevallen, ga dan onmiddellijk naar een arts.